

# HARTMANN



## Sterillium® classic pure

Die farbstoff- und parfümfreie Variante von Sterillium®.  
Inaktiviert Noroviren innerhalb der hygienischen  
Händedesinfektion.



### Produkteigenschaften

- Breites Wirkspektrum, inklusive begrenzt viruzid PLUS
- Farbstoff- und parfümfrei, daher geeignet für empfindliche Haut
- Ganzjahresprodukt mit bewährtem Hautpflegekomplex
- Sehr gut hautverträglich und rückfettend
- Erhöht die Hautfeuchtigkeit, erhält die Hautelastizität sowie die natürliche Glätte der Haut

### Anwendungsgebiete

Ganzjahresprodukt für die hygienische und chirurgische Händedesinfektion. Für alle hygienerelevanten Einrichtungen im Gesundheitswesen und Industrie geeignet. Besonders für Bereiche, in denen zusätzlich Wert auf Farbstoff- und Parfümfreiheit gelegt wird.

### Anwendung und Dosierung

#### Hygienische Händedesinfektion:

3 ml unverdünnt in die trockenen Hände einreiben, dabei alle Hautpartien erfassen. Besonders auf Fingerkuppen und Daumen achten. Die Hände über die gesamte Einwirkzeit von 30 Sekunden feucht halten.

#### Chirurgische Händedesinfektion:

Trockene Hände und Unterarme bis zu den Ellenbogen sorgfältig mit dem Präparat einreiben. Hände gezielt behandeln. Dabei besonderes Augenmerk auf die Fingerspitzen, auf die Handflächen und insbesondere die Daumenpartien legen. Die Hände und Unterarme müssen während 1,5 Minuten vollständig benetzt sein.

| Wirksamkeit                                                        | Prüfmethode              | Einwirkzeit |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|
| <b>Bakterien / Pilze</b>                                           |                          |             |
| Hygienische Händedesinfektion                                      | VAH / EN 1500            | 30 Sek.     |
| Chirurgische Händedesinfektion                                     | VAH / EN 12791           | 1,5 Min.    |
| Bakterizidie                                                       | EN 13727                 | 15 Sek.     |
| Levurozidie                                                        | EN 13624                 | 15 Sek.     |
| Tuberkulozidie                                                     | EN 14348                 | 30 Sek.     |
| Mykobakterizidie                                                   | EN 14348                 | 30 Sek.     |
| <b>Viren</b>                                                       |                          |             |
| Begrenzte Viruzidie (inkl. HBV, HIV, HCV)                          | DVV / EN 14476           | 15 Sek.     |
| Begrenzt viruzid PLUS                                              | EN 14476                 | 1 Min.      |
| Norovirus                                                          | EN 14476                 | 30 Sek.     |
| <b>RKI-Listung</b>                                                 |                          |             |
| Mittel zur Desinfektion nach behördlicher Anordnung gem. § 18 IfSG | Bereich A                | 30 Sek.     |
|                                                                    | Bereich begrenzt viruzid | 30 Sek.     |

### Wirkstoff pro 100 g

Propan-2-ol 45,0 g, Propan-1-ol 30,0 g, Mecetroniumetilsulfat 0,2 g

### Wirkspektrum

Bakterizid, levurozid, tuberkulozid, mykobakterizid, begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV), begrenzt viruzid PLUS

# Sterillium® classic pure



## Listung

RKI-Liste, VAH, IHO Desinfektionsmittel-liste

## Chemisch-physikalische Daten

Aussehen transparent, farblos  
Dichte (bei 20 °C) ca. 0,85 g/cm<sup>3</sup>  
Flammpunkt 23 °C  
(gem. DIN 51755)

## Haltbarkeit

Im geöffneten, aber wieder fest verschlossenen Originalgebinde, mit aufgeschraubter Einmalpumpe oder im Eurospender 1 plus / 1 plus touchless: 12 Monate.

## Klassifizierung

Arzneimittel BfArM Zul. Nr. 25918.00.00

## Fachberatung

HARTMANN SCIENCE CENTER

Tel: +49 (0) 40 - 54 00 6 -111

E-Mail: [science-center@hartmann.info](mailto:science-center@hartmann.info)



**Wir forschen für  
den Infektionsschutz**  
[hartmann-science-center.com](http://hartmann-science-center.com)

| Produktname                                          | Packungsinhalt   | Artikelnummer | PZN      | Versand-Einh.<br>Packungen |
|------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------|----------------------------|
| <b>Sterillium® classic pure</b><br>Klinikpackungen   | 100 ml Flasche   | 982 061       | -        | 45                         |
|                                                      | 500 ml Flasche   | 982 062       | -        | 20                         |
|                                                      | 1000 ml Flasche  | 982 064       | -        | 10                         |
| <b>Sterillium® classic pure</b><br>Originalpackungen | 100 ml Flasche   | 982 060       | 04817436 | 45                         |
|                                                      | 500 ml Flasche   | 982 063       | 04817465 | 20                         |
|                                                      | 1000 ml Flasche  | 982 065       | 04818401 | 10                         |
|                                                      | 5 Liter Kanister | 982 066       | 04818418 | 1                          |

**Sterillium classic pure, Lösung zur Anwendung auf der Haut:** Wirkstoffe: Propan-2-ol, Propan-1-ol, Mecetroniumetilsulfat. **Zusammensetzung:** 100 g Lösung enthalten: Wirkstoffe: Propan-2-ol 45,0 g, Propan-1-ol 30,0 g, Mecetroniumetilsulfat 0,2 g. **Sonstige Bestandteile:** Glycerol 85 %, Tetradecan-1-ol, Gereinigtes Wasser. **Anwendungsgebiete:** Zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion. Zur Hautdesinfektion vor Injektionen und Punktionen. **Gegenanzeigen:** Für die Desinfektion von Schleimhäuten nicht geeignet. Nicht in unmittelbarer Nähe der Augen oder offener Wunden anwenden. Überempfindlichkeit (Allergie) gegen einen der Wirkstoffe oder der sonstigen Bestandteile. **Nebenwirkungen:** Gelegentlich kann eine leichte Trockenheit oder Reizung der Haut auftreten. In solchen Fällen wird empfohlen, die allgemeine Hautpflege zu intensivieren. Allergische Reaktionen sind selten.

**Pharmazeutischer Unternehmer:** BODE Chemie GmbH, Melanchthonstraße 27, 22525 Hamburg. (Stand: 09/2020)



Hilft. Pflegt. Schützt.

PAUL HARTMANN AG  
Paul-Hartmann-Straße 12  
89522 Heidenheim  
Deutschland

Tel. +49 (0) 7321-36-0  
Fax +49 (0) 7321-36-36  
[info@hartmann.info](mailto:info@hartmann.info)  
[www.hartmann.info](http://www.hartmann.info)