

AEROuse – Wärmekomresse

Artikelbeschreibung:

Sofort einsetzbare Wärmekomresse zur effektiven lokalen Wärmetherapie und zur vorübergehenden Linderung leichter Muskel- und Gelenkschmerzen sowie von Muskelsteifheit, verursacht durch Überanstrengung, Zerrungen, Verstauchungen oder Muskelverspannungen. Die gezielte Wärmeapplikation fördert die Durchblutung, entspannt das Weichgewebe und hilft, Blutstauungen zu reduzieren.

Bestellnummer: HWK01-NA-15x23

Allgemeine Produktinformationen

- Schnelle Anwendung – sofort einsatzbereit ohne externe Wärmequelle
- Praktisch und gut transportabel
- Innerhalb von Sekunden einfach aktivierbar
- Geeignet für den Einsatz in medizinischen Einrichtungen sowie im privaten Haushalt
- Ideal für eine lokale und gezielte Akutversorgung
- Auf Natriumacetat/Wasser-Basis
- Einmalgebrauch



Einfache Handhabung



1. Innenliegenden Beutel mit Flüssigkeit ertasten und zerdrücken.



2. Kurz und kräftig schütteln, um den Inhalt zu vermischen.



3. Mit einem Tuch umhüllt anwenden.

Technische Daten

Materialien	PE-Nylon (Beutel) Natriumacetat, Wasser (Innenmaterial)
Farbe	Orange / Weiß
Lagerbedingungen	0 °C bis 40 °C, bei Raumtemperatur trocken lagern. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.
Gewicht	Ca. 0,2 kg
Größe (B x H)	15 x 23 cm
Verpackung	VE = 1 Stk.
Haltbarkeit	3 Jahre
Medizinprodukte Klasse	Ila

