
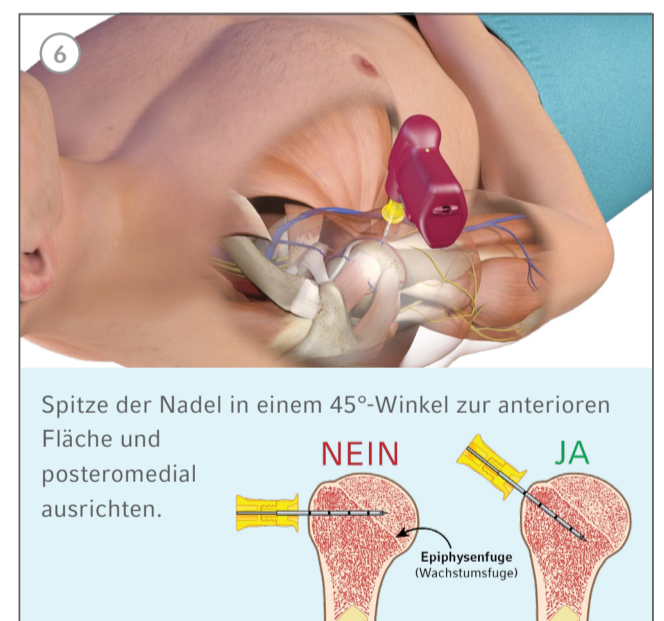
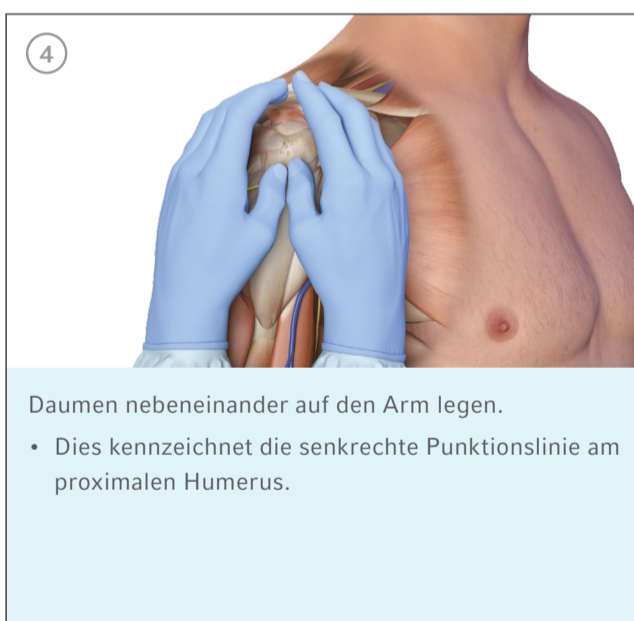
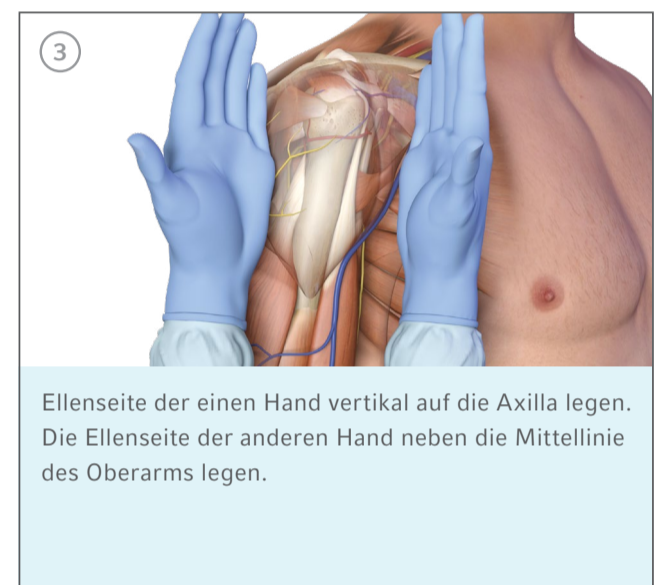
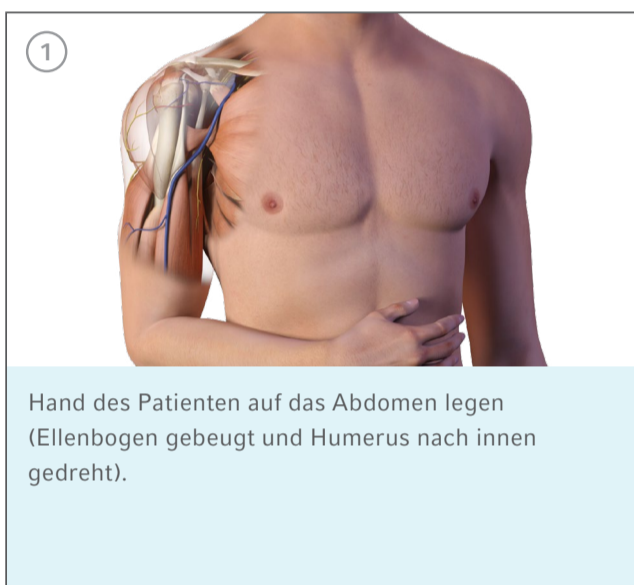
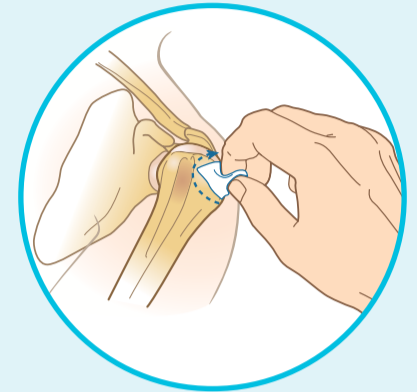
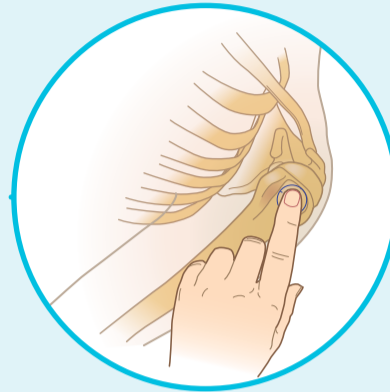
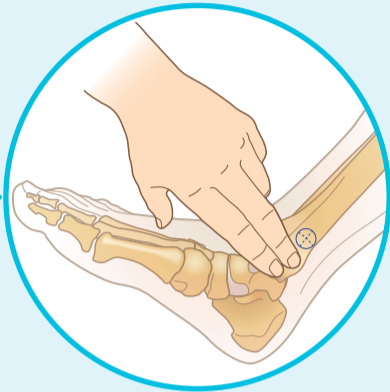


Nadel einführen


Orientierungspunkte ermitteln

Stelle reinigen

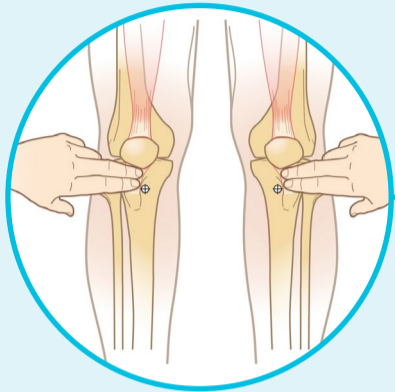

Katheter entfernen

EZ-IO Katheter nicht länger als 72 Stunden in situ belassen.

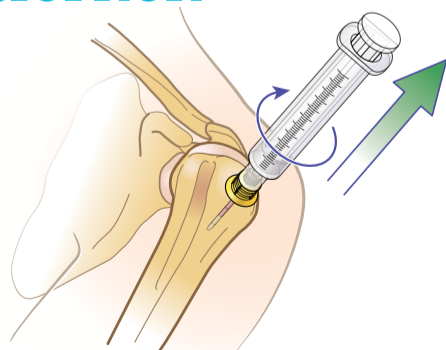

- Extremität des Patienten stabilisieren.
- Sterile Luer-Lock-Spritze an das Verbindungsstück des Katheters anschließen.
- Katheter im Uhrzeigersinn drehen – dabei vorsichtig ziehen.
- Entfernten Katheter sofort über einen geeigneten Behälter für biologische Gefahrstoffe entsorgen.

Katheter beim Entfernen NICHT HIN- UND HERBEWEGEN. Durch Hin- und Herbewegen oder Biegen des Katheters mit einer Spritze kann sich der Katheter vom Verbindungsstück lösen!

Die intravenöse oder intraossäre Verabreichung von Arzneimitteln, einschließlich Lidocain, liegt in der Verantwortung des behandelnden, leitenden oder verordnenden Arztes und stellt keine offizielle Empfehlung von Teleflex Incorporated und seinen Tochtergesellschaften dar. Teleflex ist nicht der Hersteller von Lidocain. Anwender sollten sich mit den Anweisungen oder Gebrauchsanweisungen des Herstellers sowie sämtlichen Indikationen, Nebenwirkungen, Kontraindikationen, Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweisen von Lidocain vertraut machen. Teleflex übernimmt keinerlei Haftung für die Verwendung, Anwendung oder Interpretation der Verwendung dieser Informationen bei der medizinischen Behandlung eines Patienten. Die Dosierungsempfehlungen für Lidocain wurden auf der Grundlage von Forschungsergebnissen erstellt. Weitere Informationen finden Sie unter www.eziocomfort.com

Teleflex, das Teleflex-Logo, Arrow, EZ-Connect und EZ-IO sind Marken bzw. eingetragene Marken von Teleflex Incorporated oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und/oder anderen Ländern. Die Informationen im vorliegenden Material ersetzen nicht die Gebrauchsanweisung für das jeweilige Produkt. © 2021 Teleflex Incorporated. Alle Rechte vorbehalten. MCI-2021-0331 06 21